

הוראות הפעלה

מאזני תינוקות

דגם : ניצן

(FALCON)

1. הקדמה

אנו מברכים אתכם על צעדכם הנכון בבחירת מכשיר מתוצרתנו.

להלן הוראות הפעלת המכשיר לנוחיותכם.

במידה ונתקלתם בבעיה ו/או קשיים עם הפעלת המכשיר נא לפנות לסוכן ממנו רכשתם את המכשיר או למשרדנו ונשמח לעזור לכם.

בברכה,

**מחלקה טכנית
מאזני שקל**

2. תחזוקה ובטיחות

- ◆ הנח את המאזניים במקום יציב ואת מגש השקילה באופן ישר ויציב.
- ◆ וודא שדופן המגש עם סרגל המדידה בצידו האחורי של המאזניים.
- ◆ וודא שהמכשיר מחובר למתח הנכון - 220 וולט, אך ורק דרך ספק הכח.
- ◆ אם סמן LOW BAT (סוללות חלשות) מופעל, יש להחליף את הסוללות או לחבר את המאזניים לחשמל בהקדם אפשרי.
- ◆ כדי למנוע סכנת פיצוץ, יש להחליף סוללות רק לסוג המתאים. זרוק את הסוללות לאחר גמר שימוש לפי ההוראות.
- ◆ נקה את ראש השקילה במטלית לחה בלבד. המנע משפיכת מים או חומרים ממיסים על גוף המאזניים.
- ◆ לניקוי המגש, העשוי פלסטיק, מומלץ לפרקו מגוף המאזניים ולנקותו במים חמים ובסבון.
- ◆ טמפרטורות העבודה של המכשיר הינן בין 0° - 40° צלסיוס.
- ◆ וודא שימוש בספק כח מדגם AD23905A, 230VAC, 9W עד 9VDC, 0.5A, יצרן פורנל.

3. תאור כללי

3.1 הסבר כללי :

המאזניים מיועדים לשקילת תינוקות עד עומס של 15 ק"ג. המאזניים מאפשרים שקילה חוזרת ללא הורדת התינוק, וכן החזקת קריאת המשקל בתצוגה ככל שנדרש. ניתן להפעיל את המאזניים ע"י חיבורם לחשמל או ע"י שימוש ב- 6 סוללות מגודל C.

3.2 תפקידי המקשים:

הפעלה וכיבוי של המערכת.	ON/OFF מקש הפעלה
משמש לביצוע שקילה ושקילה חוזרת של התינוק שעל גבי המאזניים.	RW עדכון מקש שקילה
משמש להחזקת קריאת המשקל ע"ג הצג (לא פעיל).	↔ מקש החזק
משמש לאיפוס מנגנון השקילה.	- 0 - מקש איפוס

3.3 הודעות בתצוגה:

מופיעה כאשר מנגנון השקילה מאופס.	'ZERO'
חצים משני צדי התצוגה נדלקים כאשר מתקבלת קריאת שקילה יציבה.	◀ ▶
חץ בודד נדלק בפינה הימנית התחתונה כאשר המאזניים במצב החזק.	▶
מופיעה כאשר הסוללות חלשות ויש להחליפן בקרוב.	'BAT'

קיבוץ בית קשת, ד.ג. גליל תחתון 1524700 | טלפון: 04-6629100 | פקס: 04-6765775

4. הוראות הפעלה

4.1 איפוס והכנה:

- א.** ודא שהמאזניים מונחים על משטח ישר ויציב.
- ב.** חבר את כבל ספק הכח למאזניים ואת ספק הכח עצמו לנקודת חשמל 220V, או הכנס 6 סוללות מגודל C בתחתית המאזניים. לשם הכנסת הסוללות, יש לפתוח 2 ברגים.
- ג.** לחץ על מקש **[הפעלה]** - בתצוגה תופיע המילה Start והמערכת תבצע סדרת בדיקות פנימיות.
- ד.** המתן עד להופעת המילה **ZERO** וכן אפסים בתצוגה. אין להעמיס משקל על משטח השקילה עד להופעת **ZERO** בפניה השמאלית של התצוגה.
- ◆ אם אין **ZERO** ואפסים בתצוגה - לחץ על לחצן **[אפוס]**.
- ה.** במידה וקיימת סוללה נטענת במאזניים, רצוי לבצע טעינה ראשונית ממושכת לפני השימוש במאזניים ללא חיבור לרשת החשמל.

4.2 ביצוע שקילה:

- א.** ודא הופעת **ZERO** בתצוגה.
- ב.** שים את התינוק הנשקל בזירות במרכז משטח השקילה ולחץ על כפתור RW. המערכת תבצע תהליך מדידה שיערך מספר שניות, שבמהלכן יופיעו 2 שורות קווים מהבהבים.
- ג.** לאחר גמר המדידה, יופיע משקל התינוק בתצוגה ושני חצים המעידים על התייצבות ואמינות השקילה.
- ד.** במידה ותדרש שקילה/מדידה חוזרת של אותו תינוק, ניתן להקיש על מקש [RW עידכון], כך שהמאזניים יבצעו מדידה נוספת עד התייצבות חדשה.

4.3 שקילה עם ריפוד עד 300 גרם (חיתול, שמיכה וכו'..)

- א.** ודא שהתצוגה מאופסת וסימון "ZERO" דולק.
- ב.** הנח את הריפוד על מגש השקילה.
- ג.** לאחר שמשקל הריפוד מופיע בתצוגה, לחץ על מקש [ZERO].
- ד.** התצוגה תתאפס, סימון "ZERO" ידלק והמאזניים מוכנים לשקילת התינוק.
- ה.** בצע את שקילת התינוק לפי סעיף 4.2.
- ו.** לאחר הורדת הריפוד מהמאזניים, לחץ על לחצן "ZERO" לאיפוס.

4.4 שקילה עם ריפוד מ- 300 גרם עד 2400 גרם (מזרן וכו')

- א.** הנח את המזרן על מגש השקילה לפני הדלקת המאזניים.
- ב.** לחץ על כפתור ON/OFF להדלקת המאזניים.
- ג.** התצוגה תתאפס, סימון "ZERO" ידלק והמאזניים מוכנים לשקילת התינוק.
- ד.** בצע את שקילת התינוק לפי סעיף 4.2.
- ה.** וודא תמיד הנחת המזרן על המאזניים לפני הדלקת המאזניים.

4.5 ביצוע נעילת תצוגה (החזק) לא פעיל

בכל שלב של השקילה ניתן להינעל על המשקל שמופיע בתצוגה בעזרת מקש החזק.

- במצב של החזק, המאזניים לא מתאפסים באופן אוטומטי לאחר הורדת התינוק, אלא רק לאחר הקשה על מקש האיפוס $[-\rightarrow 0]$.



משקל התינוק האחרון שנמדד ישאר נעול בתצוגה, כך שניתן יהיה לבצע את רישום המשקל מבלי להשאיר את התינוק על גבי המאזניים.

כאשר המאזניים במצב החזק, ניתן לבצע שקילות נוספות מבלי לאפס את המאזניים משקילה לשקילה כלל, אלא להשתמש במקש ה- [RW עדכון] בכל פעם ששוקלים תינוק חדש.

5. עבודה עם סוללה

5.1 זמן פעולת המאזניים:

כאשר המאזניים מצוידים בסוללה נטענת, ניתן להפעיל את המאזניים עד 50 שעות עבודה בעזרת הסוללה (כאשר הסוללה מלאה).

טעינת הסוללה מתבצעת ע"י חיבור ספק הכח המצורף בין המאזניים למקור מתח 230V. כאשר מחברים את הספק ומתבצעת טעינה, ידלק לד בצבע ירוק בחזית המאזניים בפינה העליונה מימין.

5.2 זמן טעינת הסוללה:

כל שעת הטעינה טוענת את הסוללה ל- 4 שעות עבודה.

- מומלץ לכבות את המאזניים בזמן ההטעינה.

6. מידע על שרות

המוצר שסופק לך יצא ממפעלנו לאחר שעבר סדרת בדיקות מעמיקות ומקיפות ונמצא תקין ומכיל כראוי.

אם בכל זאת נתקלת בתקלה כלשהי, נודה לך אם תפנה/י את תשומת לבנו לכך ונשמח לטפל בה.

במקרה של תקלה, **אין** לפתוח את המכשיר,
יש להודיע למרכז שרות מורשה:

מרכז שירות לקוחות ארצי :

מאזני שקל
קיבוץ בית קשת
הגליל התחתון 1524700
טל': 04-6629100
פקס: 04-6765775 / 04-6629146