


הוראות הפעלה למד גובה שוקל דגם H120

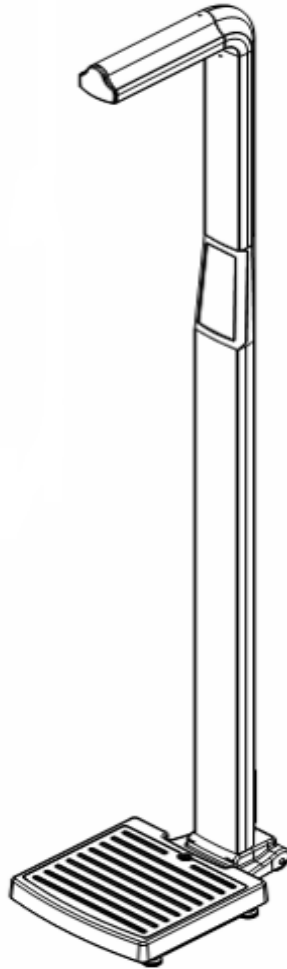


הנחיות שימוש למאזני 120 – מאזני מד גובה


מסמך זה מתאר את אופן השימוש והתחזוקה של המאזניים.

הנחיות שימוש:

- מקם את המאזניים קרוב לשקע החשמל ובמרחק של לפחות 50 ס"מ ממנורת פלורסנט.
- חבר את ספק הכוח למאזניים ולאחר מכן לשקע בקיר.

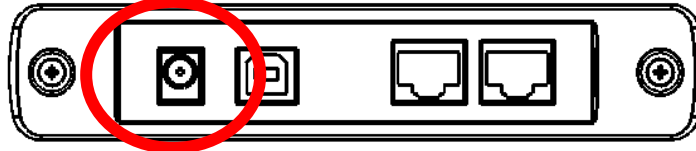


- המאזניים ידלקו ויאתחלו את עצמם.
- המתן להודעת "עלה על המאזניים" – step up
- המתן כ- 15 דקות עד להתייצבות מדידת מידת החום של החדר במאזניים למידת חום החדר האמיתית. בדגמים מסויימים מידת חום החדר מופיעה על הצג.

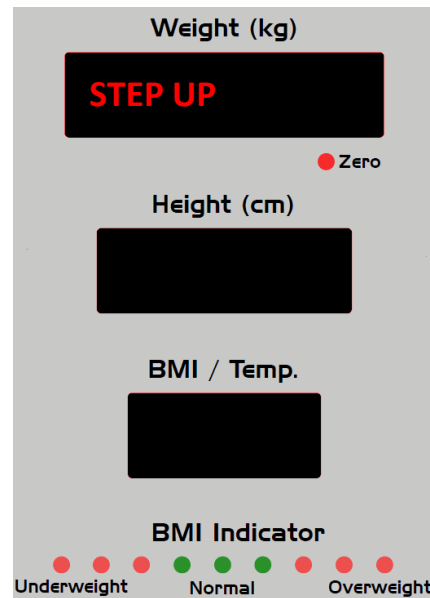

- המאזנים מוכנים למדידת משקל וגובה.

ביצוע המדידה:

בקש מהמטופל לעלות על המאזניים, פנים אל מול התצוגה ועמידה זקופה ומבט לפנים.

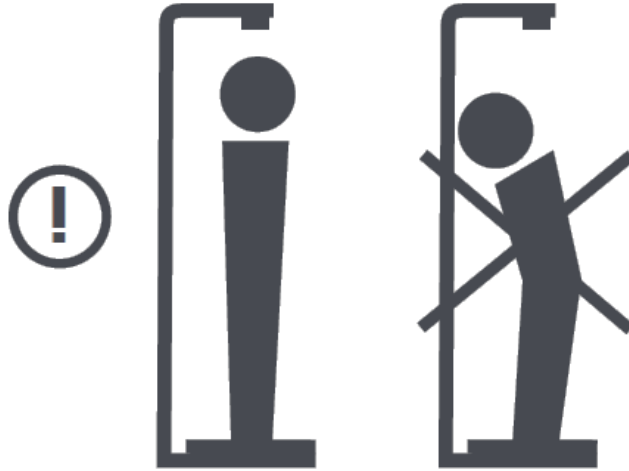

המדידה מתחילה מיידית לאחר העלייה על משטח השקילה.

מדידת מד הגובה מבוצעת ע"י גלי קול בתדירות גבוהה מזו שהאוזן האנושית שומעת, אך לטובת המשתמשים ישמעו מס' תקתוקים המעידים על מדידת הגובה.

בסיום של המדידה יופיעו התוצאות בצג.

63.5

16 1.0

2 1.9

○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

משקל, גובה וחישוב מסת גוף (BMI)

מכיוון שמדידת הגובה רגישה לעמידה של המשתמש, על מנת לקבל מדידת גובה מהימנה, יש לבצע שלוש (3) מדידות.

מידע על שירות:

המוצר שסופק לך יצא ממפעלנו לאחר שעבר סדרת בדיקות מעמיקה ומקיפה ונמצא תקין ומכוייל כראוי.

במידה ונתקלת בתקלה כלשהי, נודה לך אם תפנה/י את תשומת לבנו לכך ונשמח לטפל בה.

במקרה של תקלה,
אין לפתוח את המכשיר.
יש להודיע למרכז שירות מורשה:

מוקד שרות לקוחות ארצי:

מאזני שקל
קיבוץ בית קשת
גליל תחתון 1524700

טל: 04-6629100
פקס: 04-6629146