


הוראות הפעלה

למד גובה שוקל דגם H120

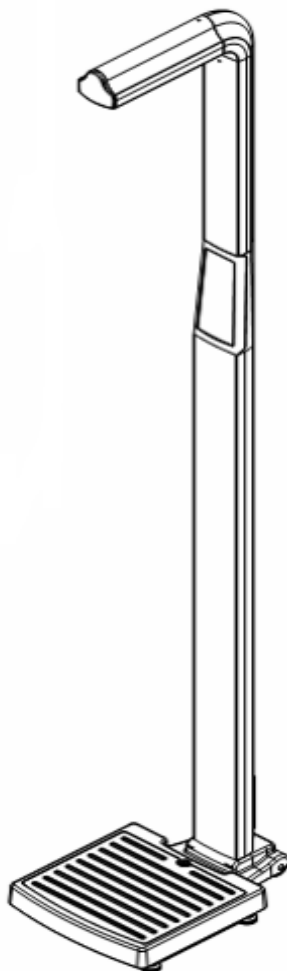



שחת לקוחות: המרכבה 7, א.ת. ציפורית (מתחם פניציה), ת.ד. 880 נוף הגליל טל: 04-6629100 פקס: 04-6765775
שיווק: העמל 11 כניסה א', ראש העין, טל: 04-6629780, פקס: 03-9030904, www.shekelonline.co.il

הנחיות שימוש למאזני 120 – מאזני מד גובה

מסמך זה מתאר את אופן השימוש והתחזוקה של המאזניים.


הנחיות שימוש:

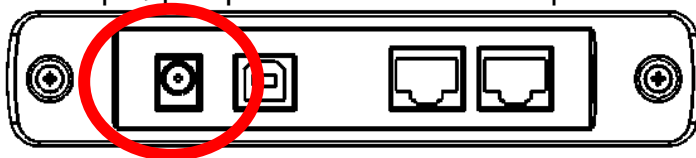- מקם את המאזניים קרוב לשקע החשמל ובמרחק של לפחות 50 ס"מ ממנורת פלורסנט.
 - חבר את ספק הכוח למאזניים ולאחר מכן לשקע בקיר.
- 
- המאזניים ידלקו ויאתחלו את עצמם.
 - המתן להודעת "עלה על המאזניים" – step up
 - המתן כ- 15 דקות עד להתייצבות מדידת מידת החום של החדר במאזניים למידת חום החדר האמיתית. בדגמים מסויימים מידת חום החדר מופיעה על הצג.

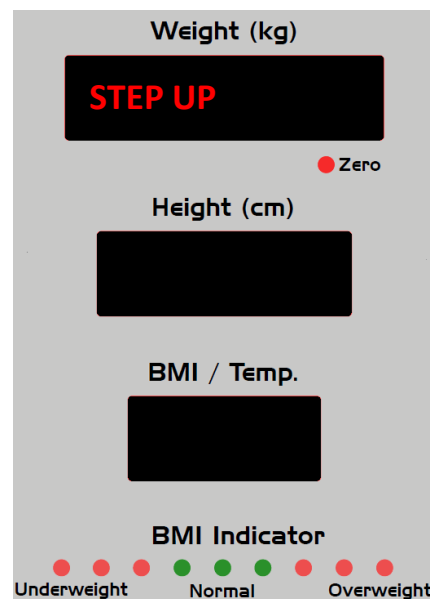

- המאזניים מוכנים למדידת משקל וגובה.

בקש מהמטופל לעלות על המאזניים, פנים אל מול התצוגה ועמידה זקופה ומבט לפנים.

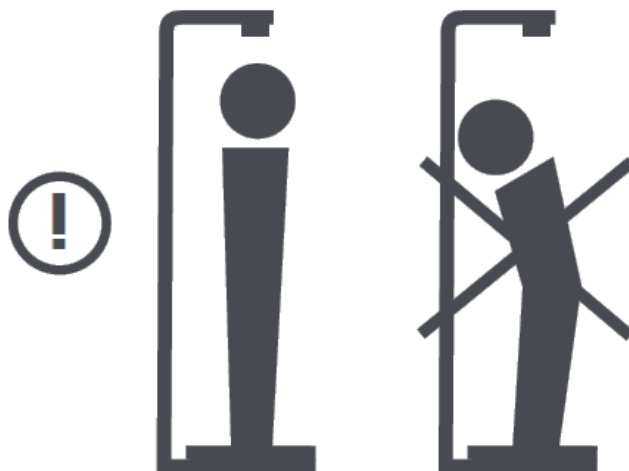

המדידה מתחילה מיידית לאחר העלייה על משטח השקילה.

מדידת מד הגובה מבוצעת ע"י גלי קול בתדירות גבוהה מזו שהאוזן האנושית שומעת, אך לטובת המשתמשים ישמעו מס' תקתוקים המעידים על מדידת הגובה.

בסיום של המדידה יופיעו התוצאות בצג.

63.5

16 1.0

2 1.9

○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

משקל, גובה וחישוב מסת גוף (BMI)

מכיוון שמדידת הגובה רגישה לעמידה של המשתמש, על מנת לקבל מדידת גובה מהימנה, יש לבצע שלוש (3) מדידות.

המוצר שסופק לך יצא ממפעלנו לאחר שעבר סדרת בדיקות מעמיקה ומקיפה ונמצא תקין ומכוייל כראוי.

במידה ונתקלת בתקלה כלשהי, נודה לך אם תפנה/י את תשומת לבנו לכך ונשמח לטפל בה.

במקרה של תקלה,
אין לפתוח את המכשיר.
יש להודיע למרכז שירות מורשה:

מוקד שרות לקוחות ארצי:

מאזני שקל

מאזני שקל 2008 בע"מ
המרכבה 7, א.ת. ציפורית (מתחם פניציה),
ת.ד. 880 נוף הגליל
טלפון: 04-6629100, פקס: 04-6765775

www.shekelonline.co.il